

MANUAL DE UTILIZARE SET MULTIMEDIA

Inainte de instalare

- Asezati monitorul intr-o incapere unde lumina solara nu reflecat direct in monitor. Lumina indirecta este recomandata pentru vizualizare confortabila.
- Lasati suficient spatiu intre monitor si perete pentru a permite ventilatia
- Evitati instalarea dispozitivului in spatii unde temperatura este foarte ridicata
- Acest dispozitiv functioneaza la o sursa de curent AC cu voltaj de 100-240V
- Nu instalati dispozitivul langa o sursa de caldura cum ar fi radiator, conducte de aer conditionat sau lumina directa
- Nu acoperiti ventilatia in timpul functionarii dispozitivului

1. Indepartati capacul bateriilor apasand si tragand in jos.
2. Introduceti doua baterii de 1.5 V (marime AAA) astfel incat polaritatea bateriilor sa se potriveasca cu polaritatea marcata din interiorul dispozitivului.
3. Asezati la loc capacul bateriilor.

- Nu folositi baterii vechi si noi impreuna
- Nu folositi diferite tipuri de baterii impreuna (de exemplu baterii Alkaline si Manganeeze)
- Tineti minte ca exista baterii reincarcabile sau de unica folosinta. Nu incercati sa reincarcati bateriile de unica folosinta.
- Indepartati bateriile din dispozitiv daca intentionati sa nu il folositi o perioada lunga de timp.

- Nu scapati pe jos telecomanda.
- Pastrati telecomanda uscata. Umezirea acesteia poate cauza defectiuni.
- Inlocuiti bateriile cu altele noi daca constatati ca nu functioneaza la

parametri optimi. **Parti functionale** (pag 2):

Taste

1. Volum –
2. Volum +
3. Canal –
4. Canal +
5. Meniu
6. Sursa
7. Power

Pentru a porni monitorul:

Instalati monitorul si conectati-l la priza de curent (100-240 V, 50/60 Hz). Indicatorul Power se va prinde rosu si monitorul este in modul Standby. In acest mod, daca butonul standby este apasat indicatorul se va

schimba in albastru. Dureaza cateva secunde pana cand imaginea va aparea pe ecran.

Pentru a stinge monitorul:

Apasati butonul standby pentru a face ca monitorul sa intre in modul Standby si apoi deconectati-l de la priza.

Nota:

- Atentie la conectarea cu alte echipamente
- Cand folositi un echipament extern cu acest set multimedia, cititi manualul de utilizare a echipamentului extern
- Opriti functionarea tuturor echipamentelor inainte de conectare. Asigurati-va ca ati efectuat conectarea in mod corect.

Apasati butonul Sursa pentru a afisa o lista cu sursele disponibile. Apasati butoanele ^ sau v pentru a selecta sursa preferata. Apasati butonul OK pentru a confirma.

Meniu ecran (pag 4)

- Modul TV

Apasati butonul Meniu pentru a arata canal, imagine, sunet, ceas, meniu setari. Apasati butoanele v^ sau <

> pentru a selecta submeniul dorit . In submeniu, apasati butoanele v^ sau < > pentru a selecta elementul dorit.

Canal

- Acord automat:

Apasati butoanele v^ pentru a selecta cautarea automata apoi apasati butonul OK pentru a porni cautarea automata.

- Acord manual:

Apasati butoanele v^ pentru a selecta acordul manual si apoi apasati tasta OK pentru a porni cautarea manuala.

- Editarea programelor:

Apasati butoanele v^ pentru a selecta editarea programelor si apoi apasati tasta OK pentru a intra in meniu.

Imagine

Apasati butoanele v^ pentru a selecta modul imagine si apoi butonul OK pentru a intra in meniu. - Contrast

Apasati butoanele v^ pentru a selecta constrastul si apoi apasati butonul OK pentru a regla.
- Luminozitate

Apasati butoanele v^ pentru a selecta luminozitatea si apoi apasati butonul OK pentru a regla. - Culori

Apasati butoanele v^ pentru a selecta culoarea si apoi apasati butonul OK pentru a regla.
- Claritate

Apasati butoanele v^ pentru a selecta claritatea si apoi apasati butonul OK pentru a regla.
- Ton

Apasati butoanele v^ pentru a selecta tonul si apoi apasati butonul OK pentru a regla.
- Temperatura de culoare:

Apasati butoanele v^ pentru a selecta temperatura culorii si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Proportie ecran:

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta proportia ecranului si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Reducerea zgomotului:

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta reducerea zgomotului si apoi apasati butonul OK pentru a regla. - Ecran

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta ecran si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

Sunet (pag 5)

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta modul imagine si apoi butonul OK pentru a selecta.

- 120 Hz

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta 120 Hz si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- 500 Hz

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta 500 Hz si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- 1.5KHz

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta 1.5 KHz si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- 5 KHz

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta 5 KHz si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- 10 KHz

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta 10 KHz si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Balans

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta Balans si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Volum Auto

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta Volumul auto si apoi apasati butonul OK pentru a selecta. - Sunet de ambianta

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta sunetul de ambianta si apoi apasati butonul OK pentru a selecta. - Modul SPDIF

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta modul SPDIF si apoi apasati butonul OK pentru a selecta. **Ceas**

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta Ceasul si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Ceas oprit

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta ceas oprit si apoi apasati butonul OK pentru a selecta.

- Ceas pornit

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta ceas pornit si apoi apasati butonul OK pentru a selecta.

- Cronometru oprire

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta cronometru oprire si apoi apasati butonul OK pentru a selecta. - Standby automat

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta standby automat si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

Meniu setari

- Limba OSD

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta limba OSD si apoi apasati butonul OK pentru a seta.

- Mod economisire energie

Apasati butoanele $\vee\wedge$ pentru a selecta modul de economisire energie si apoi apasati butonul OK pentru a seta. - RSS

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta RSS si apoi apasati butonul OK pentru a seta.

- Ecran albastru

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta ecran albastru si apoi apasati butonul OK pentru a seta. **Mod PC** (pag 6)

Apasati butonul meniu pentru a arata Imagine, Sunet, Ceas, Meniu setari. Apasati butoanele \vee^{\wedge} sau $<$ $>$ pentru a selecta submeniul dorit si valoarea ajustabila. In submeniu, apasati butoanele \vee^{\wedge} sau $<$ $>$ pentru a alege elementul dorit.

- Imagine

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta meniul Imagine si apoi apasati butonul OK pentru a selecta. - Contrast

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta constrastul si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Luminozitate

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta luminozitatea si apoi apasati butonul OK pentru a regla. - Culori

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta culoarea si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Claritate

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta claritatea si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Ton

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta tonul si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Temperatura de culoare:

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta temperatura culorii si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Proportie ecran:

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta proportia ecranului si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Reducerea zgomotului:

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta reducerea zgomotului si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Ecran

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta ecran si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

Sunet (pag 5)

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta modul imagine si apoi butonul OK pentru a selecta.

- 120 Hz

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta 120 Hz si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- 500 Hz

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta 500 Hz si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- 1.5KHz

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta 1.5 KHz si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- 5 KHz

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta 5 KHz si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- 10 KHz

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta 10 KHz si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Balans

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta Balans si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Volum Auto

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta Volumul auto si apoi apasati butonul OK pentru a selecta.

- Sunet de ambianta

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta sunetul de ambianta si apoi apasati butonul OK pentru a selecta.

- Modul SPDIF

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta modul SPDIF si apoi apasati butonul OK pentru a selecta.

Ceas

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta Ceasul si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

- Ceas oprit

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta ceas oprit si apoi apasati butonul OK pentru a selecta.

- Ceas pornit

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta ceas pornit si apoi apasati butonul OK pentru a selecta.

- Cronometru oprire

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta cronometru oprire si apoi apasati butonul OK pentru a selecta.

- Standby automat

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta standby automat si apoi apasati butonul OK pentru a regla.

Meniu setari

- Limba OSD

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta limba OSD si apoi apasati butonul OK pentru a seta.

- Mod economisire energie

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta modul de economisire energie si apoi apasati butonul OK pentru a seta.

- Revenire la setarile din fabrica

Apasati butoanele \vee^{\wedge} pentru a selecta Revenire la setarile din fabrica si apoi apasati butonul OK pentru a

seta.

Mod USB (pag 8)

Apasati butonul Meniu pentru a arata Poze, Muzica, Video, Text. Apasati butoanele \vee^{\wedge} sau $< >$ pentru a selecta submeniul dorit si valoarea ajustabila. In submeniu, apasati butoanele \vee^{\wedge} sau $< >$ pentru a alege elementul dorit.

- Vizualizare poze

1. Introduceti stick-ul USB in portul USB.
2. Apasati butoanele \vee^{\wedge} sau $< >$ pentru a selecta o poza si apoi OK pentru a intra in submeniu.
3. Selectati C:/ si apoi apasati OK pentru a confirma.
4. Selectati poza dorita si apoi apasati OK pentru a confirma.

5. Apasati pentru a reda si apoi OK pentru a arata meniul. Apasati butonul pentru pauza, pentru a reda elementul anterior, | pentru a reda elementul urmator, □ pentru stop sau intoarcere la meniul anterior, apasati butonul pentru a repeta toate programele anterioare. Apasati butonul 🎵 pentru a reda muzica MP3, butonul lista pentru a vizualiza lista cu melodii, butonul info pentru a vedea detaliile pozelor.
6. Apasati butonul > pentru a arata alte functii. Apasati tastele “rotate” pentru a roti poza in sensul acelor de ceasornic sau in sens invers acelor de ceasornic.
7. Apasati tasta “zoom” pentru a departa sau a apropia poza. Apasati tasta “move” pentru a misca poza.
8. Apasati butonul “exit” pentru a iesi din meniu.

- Redare muzica

1. Introduceti stick-ul USB in portul USB.
2. Apasati butoanele √^ sau < > pentru a selecta melodia si apoi OK pentru a intra in submeniu.
3. Selectati C:/ si apoi apasati OK pentru a confirma.
4. Selectati melodia dorita si apoi apasati OK pentru a confirma.
5. Apasati pentru a reda si apoi OK pentru a arata meniul. Apasati butonul pentru pauza, pentru a reda elementul anterior, | pentru a reda elementul urmator, □ pentru stop sau intoarcere la meniul anterior, apasati butonul pentru a repeta toate programele anterioare. Apasati butonul 🎵 pentru a reda muzica MP3, butonul lista pentru a vizualiza lista cu melodii, butonul info pentru a vedea detaliile pozelor. ●
6. Apasati butonul > pentru a arata alte functii. Apasati tastele “rotate” pentru a roti poza in sensul acelor de ceasornic sau in sens invers acelor de ceasornic.
7. Apasati tasta “zoom” pentru a departa sau a apropia poza. Apasati tasta “move” pentru a misca poza.
8. Apasati butonul “exit” pentru a iesi din meniu.

- Redare video

1. Introduceti stick-ul USB in portul USB.
2. Apasati butoanele √^ sau < > pentru a selecta un video si apoi OK pentru a intra in submeniu.
3. Selectati C:/ si apoi apasati OK pentru a confirma.
4. Selectati video-ul dorit si apasati tasta playlist. Apasati tasta info pentru a vedea detaliile video-ului. Apasati pentru a creste viteza de redare. Apasati butonul > pentru a opri redarea. Apasati tasta

“ceas” pentru a seta timpul de redare. Apasati tasta “zoom” pentru a departa sau a apropia in poza. Apasati tasta “aspect ratio” pentru a alege proportia ecranului.

5. Apasati butonul “exit” pentru a iesi din meniu.

- Vizualizare text

1. Introduceți stick-ul USB în portul USB.
2. Apăsați butoanele \vee^{\wedge} sau $< >$ pentru a selecta un text și apoi OK pentru a intra în submeniu.
3. Selectați C:/ și apoi apăsați OK pentru a confirma.
4. Selectați textul dorit. Apăsați butonul $>||$ pentru a vizualiza, și OK pentru a vedea funcțiile meniului.

Apăsați butonul $||$ pentru pauză și butonul $|<<$ pentru a vizualiza textul anterior și butonul $>>|$ pentru a vizualiza textul următor. Apăsați tasta \square pentru stop sau întoarcere la meniul anterior. Apăsați butonul pentru a repeta toate programele anterioare. Apăsați butonul 🎵 pentru a reda muzică MP3 salvată în meniul muzică. Apăsați butonul “info” pentru a vizualiza detaliile textelor.

5. Apăsați butonul “exit” pentru a ieși din meniu.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Name and address of the manufacturer: / **Foshan Dade Medical Technology Co., Ltd.**
F4-4, Block 2, No 117 Zhangcha 1 Road, Chancheng, Foshan,
Guangdong, China.

Registered trade name or mark: /
EC Authorized Representative: / **Caretechion GmbH**
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf, Germany

We declare under our sole responsibility that

Name of the medical device: / **Intra Oral Camera**

Product code: / **UMDNS code: 17001**

Intended purpose: / **It is intended for chairside use of oral health examinations. It provides digital color images of intraoral or extraoral anatomy through a camera and monitor or PC. Both still and video images can be captured and stored. It aims at diagnosis and treatment of caries, diagnosis of plaque, calculus, and gingival inflammation, endodontics, orthodontic.,etc.**

Basic UDI-DI: /

of class: / **Rule13, Class I**
According to annex VIII of Regulation (EU) 2017/745 /,

Conformity assessment procedure: / **Annex XI (part A) of Regulation (EU) 2017/745/**

Notified Body: /
NB Identification number: / **CE**

CS reference: / **None**

Meets the provisions of the Regulation (EU) 2017/745 which apply to it. The declaration is valid in connection with the "final inspection report" of the device. /

2021-09-15, FoShan

Ort, Datum / Place, date /
Lieu, date / Luogo, data

He Rishan
Name und Funktion / Name and function /
Nom et fonction / Nome e funzione

