



FIȘĂ TEHNICĂ - HM-406



Denumire produs: Centură abdominală

Centură elastică, cu bretele elastice de susținere late de 3,2 cm. Cataramă ajustabilă cu culisare ușoară. Piese exterioare elastice, ușor ajustabile pentru susținerea suplimentară a spatelui. Piese de susținere abdominală conice. Suporturi din oțel elastic, total acoperiți pentru o susținere flexibilă pe întregul contur.

Material:

- bandă elastică, materialul din care este executată nu conține substanțe dăunătoare sănătății și igienei utilizatorului; nu prezintă îngrosări ale materialului în zonele de îmbinare ale materialelor.

Dimensiuni:

- centura abdominală se livrează în mai multe mărimi: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Domeniu de utilizare:

Activitatea zilnică din domeniul industrial și comercial predispune la suprasolicitări ale unor părți ale corpului uman, mai ales în timpul căratului, ridicărilor, statului prelungit în picioare, starea prelungită în condiții de tensionare. În asemenea condiții se suprasolicită coloana vertebrală, zona lombară și spatelul ceea ce conduce la afecțiuni ale tendoanelor și oaselor.

Utilizare:

- se utilizează în zone de lucru cu temperaturi cuprinse între -25°C și +40°C, umiditate a aerului relativă de 80%
- se pun bretelele și se poziționează centura confortabil în jurul taliei, șoldurilor și a cutiei toracice. Trageți capetele laterale una peste alta până la cuplarea confortabilă.
- întindeți baretele elastice exterioare înainte și fixați prin presare pentru a fixa poziția centurii.
- ajustați tensiunea centurii și a bretelelor pentru a asigura purtarea confortabilă.

Depozitare și întreținere:

- după utilizări repetate atunci când centura este considerată murdară, se spală cu apă caldă și săpun și se usucă în curent de aer.
- depozitarea se face în ambalajul original într-un loc uscat, curat, la temperatură cuprinse între 4°C și 30°C, umiditatea aerului va fi de maxim 65%, departe de surse directe de căldură sau foc deschis. Nu se va așeza deasupra lor alte obiecte. Produsul va fi ferit de contactul cu substanțe chimice.

Mențiuni importante:

- folosirea acestei centuri nu modifică cerința menținerii condiției fizice la nivel ridicat; nu previne leziunile și nu trebuie utilizată pentru a preveni incapacitățile fizice
- această centură trebuie folosită numai după efectuarea instructajului privind tehnicile corecte de ridicare;
- este recomandat ca acest instructaj să includă și consultarea medicului, în special dacă ați acuzat dureri sau disconfort în timpul ridicării;