

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Domeniu de utilizare:

Activitatea zilnică din domeniul industrial și comercial predispune la suprasolicitări ale unor părți ale corpului uman, mai ales în timpul căratului, ridicărilor, statului prelungit în picioare, starea prelungită în condiții de tensionare. În asemenea condiții se suprasolicită coloana vertebrală, zona lombară și spatele ceea ce conduce la afecțiuni ale tendoanelor și oaselor.

Utilizare:

- în zone de lucru cu temperaturi cuprinse între -25°C și +40°C, umiditate a aerului relativă de 80%;
- puneți bretelele și poziționați centura confortabil în jurul taliei, șoldurilor și a cutiei toracice;
- trageți capetele laterale unul peste celălalt până la cuplarea confortabilă;
- întindeți barețele elastice exterioare înainte și fixați prin presare pentru a fixa poziția centurii;
- ajustați tensiunea centurii și a bretelelor pentru a asigura purtarea confortabilă.

Depozitare și întreținere:

- după utilizari repetate atunci când centura este considerată murdară, se spală cu apă caldă și săpun și se usucă în curent de aer;
- depozitarea se face în ambalajul original într-un loc uscat, curat, la temperaturi cuprinse între 4°C și 30°C, umiditatea aerului va fi de maxim 65%, departe de surse directe de căldură sau foc deschis;
- nu se vor așeza deasupra lor alte obiecte;
- produsul va fi ferit de contactul cu substanțe chimice.

Mențiuni importante:

- folosirea acestei centuri nu modifică cerința menținerii condiției fizice la nivel ridicat;
- nu previne leziunile și nu trebuie utilizată pentru a preveni incapacitățile fizice;
- această centură trebuie folosită numai după efectuarea instructajului privind tehnicile corecte de ridicare;
- este recomandat ca acest instructaj să includă și consultarea medicului, în special dacă ați acuzat dureri sau disconfort în timpul ridicării.